



AMNIOQUICK® DUO+



Test rápido para la detección de la ruptura prematura de membranas (RPM) en mujeres embarazadas

● Rapidez

Resultados en 10 minutos

● Simplicidad

Toma de muestras sencilla, con o sin espéculo

● Rendimiento

- Detección combinada de IGFBP-1 y AFP (patentado)
- Evaluado en 7 estudios independientes *


** Consulte las instrucciones de uso para más información.*

LA SOLUCIÓN

La ruptura prematura de membranas (RPM) es relativamente común y se presenta en el 5-10 % de los embarazos, pudiendo provocar partos prematuros e infecciones fetales. La pérdida de líquido amniótico no es siempre detectable en los exámenes clínicos, y a menudo es útil recurrir a pruebas biológicas de confirmación. Las pruebas biológicas consisten en detectar una alcalinización de las secreciones vaginales (método simple y económico, pero insuficientemente sensible y específico) o la presencia de altas concentraciones de proteínas en el líquido amniótico (diamino oxidasa, alfa-fetoproteína, fibronectina fetal e IGFBP-1).

AMNIOQUICK® DUO+ es un test inmunocromatográfico rápido y sencillo para la detección cualitativa de las proteínas IGFBP-1 (proteína transportadora de factores insulínicos de crecimiento tipo 1) y AFP (alfa-fetoproteína) en muestras vaginales que permite la detección precoz de la RPM en mujeres embarazadas a partir de una muestra de secreción vaginal.

Procedimiento**

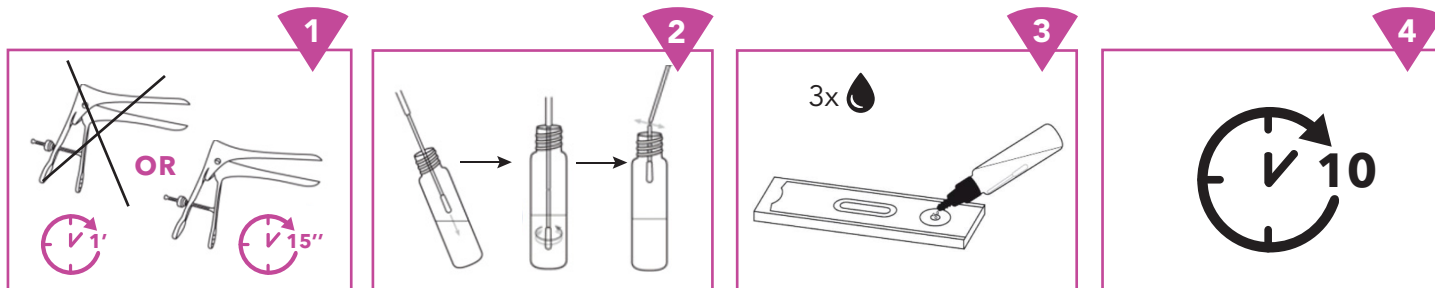

Sin espéculo: Introduzca el bastoncillo en la vagina a una profundidad de 5 cm durante 1 minuto.

Con espéculo: Impregne el bastoncillo en el fórnix posterior durante 15 segundos.

Introduzca el bastoncillo en el vial de diluyente y rótelo durante 10 segundos. Retire el bastoncillo o deje la punta en el vial de diluyente.

Desenrosque la parte superior del tapón. Utilizando el cuentagotas, añada 3 gotas de muestra diluida en la cavidad (S).

Lea el resultado en 10 minutos.

** Procedimientos simplificados. Consulte el procedimiento completo en las instrucciones de uso.

Resultados

EG < 37 semanas			EG ≥ 37 semanas			
RPM	No RPM	RPM	RPM	RPM	RPM	No RPM

C control B IGFBP-1 A AFP

Rendimiento***

	AMNIOQUICK® DUO +
Sensibilidad	96,4 %
Especificidad	87,5 %

*** Estudio interno
(consulte las instrucciones de uso).

Contenido del kit

- 10 bolsas que contienen:
 - 1 casete de test
 - 1 bastoncillo vaginal estéril CE 0123
 - 1 vial de diluyente con cuentagotas
 - 1 tarjeta de paciente

Referencias CE

- BIOSYNEX**
 - Ref. 1090004 - AMNIOQUICK® Duo+ 10 tests
 - Ref. 6090002 - Control positivo de AFP y IGFBP1 1 vial para 10 controles
- opTricon Gesellschaft für optische Technologien (ALEMANIA)**
 - Ref. 5060001 - BIOSYNEX® Reader

Lea atentamente las etiquetas y/o las instrucciones de los reactivos.

BIOSYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

BIOSYNEX SA

22 Boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - France
Tel. : +33 3 88 77 57 52 - Fax : +33 3 88 78 76 78
E-mail : export@biosynex.com

www.biosynex.com

FLY_1090004_ES_V01201903R02